


Unterstützung
Einfache
Transfers



Die Alpha Aufrichthilfe ist ein stabiler, stützender Gurt, der am Rücken angelegt wird. Mit diesem Produkt kann der Anwender einen Pflegebedürftigen beim Aufstehen, Hinsetzen sowie beim Transfer sicher halten und führen. Durch die einfache Handhabung wird eine sichere rückenergonomische Arbeitsweise ermöglicht. Die Alpha Aufrichthilfe Magic verfügt im Gegensatz zur Standardversion über einen verstellbaren Gurt, der sich an die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen anpasst und zusätzliche Sicherheit bietet. Wir empfehlen die Kombination mit dem Beingurt, der die Beine sichert und beim

Transfer für zusätzliche Stabilität sorgt. (Beingurt und Aufrichthilfe Magic sind im Set PM-3025 erhältlich)

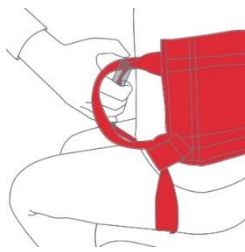

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Aufrichthilfe / Magic	Polyamid, latexfrei	rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-3015	60 x 20	590 g	(01)04250355330154(10)LOT
PM-3012	60 x 20	550 g	(01)04250355330123(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Die äußere Hülle kann bei 60°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° – 50°C) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschzusätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern. Die innenliegenden Verstärkungen müssen entfernt werden!

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.



Made in EU