

Faltbar  
4/6 Griffe  
Flexibel



Mit der Hebematte ist ein Transfer vom Bett auf die Duschieliege sowie das Aufheben eines Pflegebedürftigen vom Boden möglich. Zudem kann ein im Bett liegender Pflegebedürftiger zum Kopfende und auf die Seite bewegt werden. Die Gleitfläche verringert den Reibungswiderstand zwischen dem Pflegebedürftigen und der Transferfläche. Die Seitenteile lassen sich zusammen mit den Griffen leicht nach innen klappen. Für die maschinelle Reinigung kann der innere Teil der Hebematte herausgenommen werden.



## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Hebematte	Polyamid, latex frei	rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-4012	110 x 54	1240 g	(01)04250355340122(10)LOT
PM-4016	150 x 53	2100 g	(01)04250355340160(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt erfordert keine besondere Pflege. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

**Die innenliegenden Verstärkungen müssen vor dem Waschen herausgenommen werden!**

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.

