


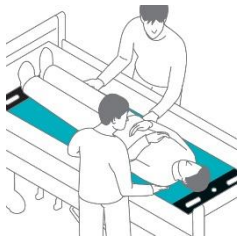

Das Rollboard Vision eignet sich besonders gut zum schonenden, schmerzfreien und reibungsarmen seitlichen Transfer bewegungseingeschränkter oder auch adipöser Personen. Insbesondere können Unebenheiten oder Zwischenräume, welche beim Aneinanderstellen von zwei Liegeflächen entstehen, überbrückt werden. Der Transfer liegender Personen kann in Notfallsituationen unterstützt werden, um wenig Bewegung in den Patienten zu bringen, wenn es noch keine Diagnose gibt. Zudem überzeugt das Alpha Rollboard Vision beim souveränen und rückschonenden Handling des Patiententransfers.



Kompromisslose Transfer- und Pflegesicherheit wird hier in Verbindung von Hygieneanforderungen, Qualität, Form und Funktion umgesetzt. Ein Textilbezug ist im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen jedoch, je nach Anwendungsgebiet die Verwendung mit Schutz- oder PEM-Einweg-Bezug. Bei der Entwicklung des Alpha Rollboard Vision wurden die Anforderungen an Produkte für Krankenhäuser, Kliniken und andere Gesundheitseinrichtungen ebenso berücksichtigt wie die Berufserfahrung von Menschen in Pflegeberufen. Alle Rollboards sind für den Einsatz bei Röntgen- und MRT-Untersuchungen geprüft und zugelassen.

### Option A

**Hygienisch unkritische und semikritische Anwendungen und Einsatzorte**

Rollboard Vision mit Textilbezug  
Einfache Wischdesinfektion -  
Bezug maschinenwaschbar bei  
60 - 80 °C



### Option B

**Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen, Einsatzarten und Einsatzorte**

Rollboard Vision mit PEM-  
Einweg-Bezug, ohne  
Textilbezug anwendbar, für  
einfache und schnelle  
Anwendung



### Option C

**Hygienisch semikritische und kritische Anwendungen und Einsatzorte**

Rollboard Vision mit Einweg-  
Schutzfolie über dem  
Textilbezug, für einfache und  
schnelle Anwendung



# Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Roll-/Zugbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
<b>Rollboard Vision</b>	Polyethylen, Latex frei	graphit	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C
			<u>nur Rollbelastung</u> 300 kg		
<b>Textil Cover</b>	Polyamid (beschichtet), Latex frei	rot/ optional blau/grün		3 Jahre	5 °C – 40 °C
<b>PEM-Einweg- Bezug</b>	Polyethylen (LDPE), Latex frei	grün			10 °C – 25 °C bei 50 – 75 % Luftfeuchtigkeit
<b>Schutzfolie</b>	Polyethylen (LDPE), Latex frei	transparent			5 °C – 40 °C

vor Sonneneinstrahlung  
schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI	Reinigung, Pflege und Desinfektion
<b>Rollboard incl. Textil Cover</b>				
PMF-9050	85 x 45	320 g	(01)04250355393517(10)LOT	Das Board kann feucht gereinigt werden: - mit herkömmlichen milden Reinigungsmitteln Das Board kann desinfiziert werden: - Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, z. B. Trionic® Achten Sie auf eine vollständige Trocknung. <b>Keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände zur Reinigung verwenden!</b> <b>Das Board ist nicht für die Anwendung im Autoklaven geeignet.</b>
PMF-9075	85 x 45	530 g	(01)04250355390752(10)LOT	
PMF-9085	95 x 50	900 g	(01)04250355390851(10)LOT	
PMF-9095	95 x 50	900 g	(01)04250355390950(10)LOT	
PMF-9150	150 x 60	1300 g	(01)04250355391506(10)LOT	
PMF-9155	150 x 60	1300 g	(01)04250355391551(10)LOT	
PMF-9170	180 x 50	1500 g	(01)04250355391704(10)LOT	
PMF-9180	195 x 50	1800 g	(01)04250355391803(10)LOT	
PMF-9190	195 x 50	1800 g	(01)04250355391902(10)LOT	



<b>Textil Cover / Ersatzbezug</b>				
PMF-9051	80 x 45	80 g	(01)04250355390516(10)LOT	Der Textilbezug kann bei 60° - 80° C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel! Bei Verwendung von Bleichmitteln, Alkohol oder Weichspülern können sich die Funktionseigenschaften des Textilbezuges nachhaltig verschlechtern. Gewebematerialien und ähnliche Oberflächen sind generell nicht für alkohol- und/oder aldehydhaltigen Desinfektionsmitteln geeignet. Nicht autoklavieren!
PMF-9076	80 x 45	80 g	(01)04250355390769(10)LOT	
PMF-9086/96	90 x 50	90 g	(01)04250355390868(10)LOT	
PMF-9151	145 x 60	120 g	(01)04250355391513(10)LOT	
PMF-9151	145 x 60	120 g	(01)04250355391513(10)LOT	
PMF-9171	170 x 50	150 g	(01)04250355391711(10)LOT	
PMF-9181	180 x 50	160 g	(01)04250355391810(10)LOT	
PMF-9186	170 x 50	1000 g	(01)04250355391865(10)LOT	



<b>Only U Einweg-Bezug</b>				
PMF-9090	90 x 53 ea.	6020 g	(01)04250355390905(10)LOT	
PMF-9152	150 x 61 ea.	6200 g	(01)04250355391520(10)LOT	
PMF-9172	180 x 53 ea.	6000 g	(01)04250355391728(10)LOT	
PMF-9077	85 x 47,5 ea.	1560 g	(01)04250355390776(10)LOT	
<b>Only U Schutzfolie</b>				
PMF-0191	90x54,5 ea	3700 g	(01)04250355301918(10)LOT	
PMF-0192	180x54,5 ea	3700 g	(01)04250355301925(10)LOT	



zusätzlich für Only U Einweg-Bezug  