

Transferhilfe Merlin Aufrechthilfe Merlin



Transferhilfe Merlin (PMM-1100)

Die Transferhilfe Merlin ermöglicht leichte, kraftsparende und rückenfreundliche Transfers. Restkräfte der Arme und Beine der Pflegebedürftigen können mobilisiert werden. Während des Transfers erfährt der Pflegebedürftige eine größtmögliche Sicherheit. Der Pflegebedürftige sollte in der Lage sein, sich festzuhalten und das Aufrichten zu unterstützen.

Die Verwendung von hochwertigem, rostfreiem Edelstahl ermöglicht auch im Nassbereich höchste Stabilität, zum Beispiel beim Duschen.

Die Transferhilfe Merlin PMM-1100 ist teilbar, um einen einfachen Transport im Auto zu ermöglichen



Aufstehhilfe Merlin (PM-6160)

Die Aufstehhilfe Merlin ist ein Multifunktionsgurt und ist optional mit der Transferhilfe Merlin PMM-1100 einsetzbar.

Während eines Transfers mit der Alpha Transferhilfe Merlin kann die Pflegekraft die Bewegung sehr effektiv kontrollieren und übergewichtige, instabile oder nervöse Klienten können sicherer gehalten werden.

Der Außengurt ist pro Seite mit je vier Doppelgriffschlaufen versehen. Diese sind sowohl als Zugschlaufen, oder auch als Einhängeschlaufen verwendbar.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Transferhilfe Merlin	Edelstahl	Grau	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonnenlicht schützen
Aufstehhilfe Merlin	Polyamid, latexfrei	rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonnenlicht schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PMM-1100	53 x 81 x 117	2180	(01)04250355311009(10)LOT
PM-6160	150 x 21	1190	(01)04250355361622(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Der Metallrahmen der Transferhilfe Merlin wird mit einem normalen Staubtuch trocken gereinigt. Zur feuchten Reinigung können Sie haushaltsübliche Flüssigreinerer verwenden. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.

PMM-1100      **CE** **MD** Made in Germany

Die Aufstehhilfe Merlin benötigt keine besondere Pflege. Sie kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

PM-6160      **CE** **MD** Made in EU