

für
schmerzempfind-
liche, schwere oder
besonders
pflegeintensive
Pflegebedürftige



Das Spannbettuch ist ein Zubehörartikel für das Drehlaken Standard (Artikel-Nr. PM-1582) oder das Drehlaken mit verdeckten Griffen (Artikel-Nr. PM-2098). Die Gleitfläche des Spannbetttuchs ist mit einem extrem reibungsarmen Material versehen. Durch die aufeinanderliegenden Gleitflächen vom Drehlaken und vom Spannbettuch werden die Reibungskräfte maximal reduziert, es entsteht der gleiche Effekt wie bei einer Gleitmatte.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Spannbettuch	Cotton, naturdrell, latexfrei	Crème	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-1584	200 x 90	1440 g	(01)04250355315847(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt bedarf keiner besonderen Wartung. Es kann bei 90°C in der Maschine gewaschen werden und ist für niedrige Trocknertemperaturen (45° - 50°) geeignet. Wir empfehlen den Einsatz von Feinwaschmittel. Beim Einsatz von Waschmitteln, die Bleichmittel oder andere chemischen Waschsätze enthalten, sowie Weichspüler können sich die Funktionseigenschaften des Produktes nachhaltig verschlechtern.

