


Effizient
Unabhängig
Große
Unterstützung

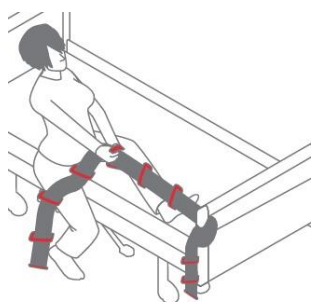

Die Bettleiter dient als Aufrichthilfe und Transferunterstützung. Sie erleichtert die Mobilisation an die Bettkante und unterstützt den Transfer. Beim Transfer unterstützt die Bettleiter einen physiologischen Bewegungsablauf mit viel Selbstständigkeit und Sicherheit. Die Bettleiter wird an einem Teil des Bettes befestigt. Der Gurt wird durch die Schlaufe gezogen. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsstelle für die auftretende Belastung geeignet ist. Die Bettleiter hat 8 Griffe, um das Aufstehen in kleinen, effizienten Schritten durchzuführen.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Bettleiter	Polyester	grau/rot	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-6090	170 x 8	440 g	(01)04250355360908(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Das Produkt erfordert keine besondere Pflege. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten.

