


sichere
komfortable
Unterstützung



Die Positionierungskeile wurden für eine aktivierende und stützende Positionierung von pflegebedürftigen Menschen entwickelt. Durch den variablen Einsatz kann je nach geplanter pflegerischer, therapeutischer oder diagnostischer Maßnahme, eine ziel- und zweckorientierte Positionierung durchgeführt werden. Die Anwendung der Positionierungskeile hat sich besonders in der Nacht bewährt, um eine möglichst störungsarme Nachtruhe des Pflegebedürftigen zu gewährleisten.

Auch bei bestmöglicher Lagerung sollte der Pflegebedürftige, je nach Gefährdungsgrad, regelmäßig umgelagert bzw. die Lagerung überprüft werden.

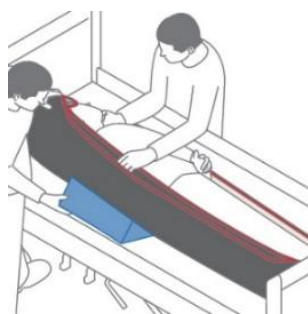

Technische Daten

| Produktname | Material | Farbe | Max Gewichtsbelastung | Garantie | Lagerung/Transport |
|----------------------|----------------------|-------|--------------------------|----------|--|
| Positionierungskeile | PU- rutschhemmend | blau | N/A | 1 Jahr | Bei -5 °C – 40 °C Vor Sonneneinstrahlung schützen |

| Artikelnr. | Maße in cm | Gewicht | UDI |
|--------------------|--------------|---------|---------------------------|
| PM-8010 Set | | 800 g | (01)04250355380104(10)LOT |
| PM-8012 2 Stück | 25 x 22 x 13 | 200 g | (01)04250355380128(10)LOT |
| PM-8015 | 50 x 22 x 13 | 400 g | (01)04250355380159(10)LOT |

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Die Positionierungskeile können nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel sowie keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften der Positionierungskeilen dauerhaft beeinträchtigen.



Made in EU