


Unterstützung
Minderung
von Druck
Rutschfest

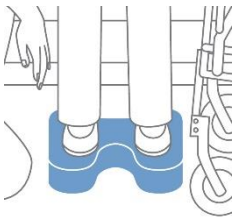

Die Unterstützungsmöglichkeiten des Fußstuhls dienen der Aktivierung oder Sicherheit der Pflegebedürftigen und bieten den Anwendern eine größtmögliche stabile Unterstützungsfläche für den Transfer von aktiven bis immobilen Pflegebedürftigen. Druck auf die Oberschenkelunterseite, welcher im Sitzen am Bett oder Stuhl durch die Seitensicherung oder Stuhlkante auftreten kann, wird durch den Einsatz des Fußstuhls vermindert. Der Fußstuhl kann zur Positionierung der Füße eingesetzt werden, so dass eine bessere Stabilität im Sitzen erreicht wird.



Mit dem Schutzbezug lässt sich das Produkt leichter mitnehmen und an einem Haken in der Nähe aufbewahren. Außerdem macht der Bezug das Produkt hygienischer und leichter zu reinigen - einfach mit Reinigungslösung abwischen und wieder verwenden.



Bei Belastung ist der Fußstuhl rutschhemmend und kann ohne Belastung leicht in die gewünschte Position geschoben werden.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Fußstuhl	Polyethylen, latex frei	blau	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen
Schutzbezug für Fußstuhl	Polyamid, latex frei	grau		3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PM-8090	38 x 32	480 g	(01)04250355380906(10)LOT
PM-8091	38 x 32	110 g	(01)04250355380982(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Der Fußstuhl kann nass gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gründlich trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung keine scheuernden oder bleichenden Mittel sowie keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften des Fußstuhles dauerhaft beeinträchtigen.

PM-8090  **CE MD** made in Germany

Der Schutzbezug für den Fußstuhl benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei 60°C in der Maschine gewaschen und bei niedrigen Temperaturen (45° - 50°C) getrocknet werden. Wir empfehlen das Waschen mit Feinwaschmitteln. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit bleichenden Inhaltsstoffen oder anderen chemischen Waschzusätzen, sowie Weichspüler, kann zu einer dauerhaften Verschlechterung der Produkteigenschaften führen.

PM-8091  **CE MD** Made in Germany