



Die Röntgenmatte ist speziell als Röntgentischauflage zur Lagerung von Patienten konzipiert worden. Die angenehme Oberfläche und die Polsterung bieten dem Patienten eine bequeme Auflage während des Röntgens.

An jeder Stelle der seitlichen Griffleisten ist ein Verschieben der Röntgenmatte sowie eine genaue Positionierung des Patienten für eine oder mehrere Anwender gleichzeitig und rückschonend möglich.

Das Material der Röntgenmatte ist vollständig röntgenfähig.



## Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max Gewichtslast	Garantie	Lagerung/Transport
Röntgenmatte	PVC/PES, latexfrei	Blau	200 kg	3 Jahre	5 °C – 40 °C vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
PMF-8200	190 x 65	2650 g	(01)04250355382009(10)LOT
PMF-8220	190 x 85	3300 g	(01)04250355382207(10)LOT

### Reinigung, Pflege und Desinfektion

Alle Petermann Röntgenmatten können feucht gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände.

Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften der Röntgenmatte dauerhaft beeinträchtigen.



Made in EU