


Röntgenraupe Schutzfolie für Röntgenkassetten

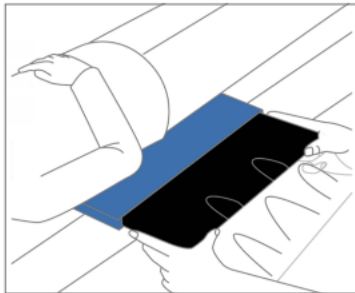

Röntgenraupen sind das ideale Hilfsmittel für den sicheren und schonenden Umgang mit der Röntgenkassette am Patienten. Das innovative Prinzip der sich rotierenden Petermann Röntgenraupe, bei dem das Produkt einfach unter dem Patienten eingeschoben wird, stellt einen großen Fortschritt in der Anwendung von Röntgenkassetten am Patienten dar. Um den strengen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, kann die Petermann Röntgenraupe problemlos wischdesinfiziert werden. Röntgenraupensets beinhalten zudem Einweg-Schutzfolien für die Röntgenkassette, um einen sicheren und effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Technische Daten

Produktname	Material	Farbe	Max. Gewichtsbelastung	Garantie	Lagerung/Transport
Röntgenraupe	Polyamid, latexfrei	Blau	200 kg	2 Jahre	5 °C – 40 °C
Schutzfolie	LDPE	Transparent	N/A		5 °C – 40 °C

Vor Sonneneinstrahlung schützen

Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
Röntgenraupe			
PMF-8260	41 x 53,5	1700 g	(01)04250355352606(10)LOT
PMF-8360	47 x 53,5	2000 g	(01)04250355353603(10)LOT

Reinigung, Pflege und Desinfektion

Alle Petermann Röntgenraupen können feucht gereinigt werden. Verwenden Sie warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie das Produkt ggf. mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie es anschließend gut trocknen. Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder bleichenden Mittel und keine scharfkantigen Gegenstände. Falls erforderlich, empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit dem Produkt Trionic® oder vergleichbaren Produkten. Die Verwendung von Bleichmitteln oder Alkohol kann die Eigenschaften der Röntgenraupe dauerhaft beeinträchtigen.



Artikelnr.	Maße in cm	Gewicht	UDI
Schutzfolie			
PMF-8261	45 x 80 je / Rolle mit 100 Stück.	4020 g	(01)04250355382610(10)LOT
PMF-8361	51 x 80 je. / Rolle mit 100 Stück	4080 g	(01)04250355383617(10)LOT

